

### Klachten- procedure

Wij vinden het prettig om onze kwaliteit verder te verbeteren. Daarom willen wij u vragen om uw klacht te bespreken met uw behandelaar. U kunt uw knelpunt of klacht kenbaar maken via ons formulier voor bevindingen, suggesties of klachten. Indien we onverhoopt het probleem niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Revalidatiecentrum. U dient uw klacht op schrift te stellen en te sturen aan het Revalidatiecentrum Breda, t.a.v. de klachtencommissie.

### Levertijd en garantie

Informatie over de levertijd van uw hulpmiddel en de geldende garantieregeling zijn na te lezen in de algemene folder van OIM Brabant.

Bezoek voor meer informatie en  
andere producten onze website  
[www.oimbrabant.nl](http://www.oimbrabant.nl)



## Handleiding Liners

[www.oimbrabant.nl](http://www.oimbrabant.nl)

#### OIM Brabant - Breda

Locatie: Revalidatie Centrum Breda  
Brabantlaan 1, 4817 JW Breda  
Telefoon (076) 533 18 00

#### OIM Brabant - Bergen op Zoom

Locatie: Lievensberg ziekenhuis  
Boerhaaveplein, 4624 VT Bergen op Zoom  
Telefoon (0164) 211 447

#### OIM Brabant - Roosendaal

Locatie: Orthopedische schoenmakerij  
Jan Vermeerlaan 253a, 4703 KW Roosendaal  
Telefoon (0165) 536 242

**OIM** *Brabant*

*Dynamisch in vooruitgang*

Uitgave mei 2008

**OIM** *Brabant*

*Dynamisch in vooruitgang*

**Geachte klant,**

**U heeft via OIM Brabant een liner gekregen. In deze handleiding worden de belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot aantrekken, dagelijks gebruik, schoonmaak en onderhoud en tal van andere praktische zaken uitgelegd.**

### **Algemene informatie**

De liner wordt gebruikt bij onderbeen- en bovenbeenprotheses met een pin, koordaansluiting of sleeve. De liner mag niet gebruikt worden bij open wonden. Bij schaafwonden of een slechte doorbloeding van het been is gebruik alleen mogelijk na overleg met de arts of de behandelaar.

De liner verbetert het draagcomfort en zorgt voor een betere bevestiging en stabiliteit. Er zijn verschillende typen en kwaliteiten liners met specifieke eigenschappen, die door de behandelaar met u zullen worden besproken.

### **Aantrekken liner**

De liner wordt binnenste buiten gedraaid en tegen het uiteinde van de stomp geplaatst, buig hierbij licht de knie om vervolgens de liner afrollen over de stomp. Let daarbij op dat u niet aan de liner trekt, waardoor deze kan inscheuren. Doe nu een prothesekous, indien nodig voorzien van een gaatje onderin voor de pin, over de liner.

Het is belangrijk bij het aantrekken dat de liner goed aansluit op de onderkant van het geamputeerde been en dat er geen lucht ingesloten blijft (hierdoor ontstaat blaarvorming). Met behulp van een pin, sleeve of aantrekkoord wordt de prothese vervolgens bevestigd aan de liner (zie volgende punt).

### **In de prothese stappen (onderbeen)**

Schuif de prothese over de liner totdat u niet verder kunt, ga staan en druk de laatste lucht er uit door meer druk te geven, u hoort de tandjes van de pin in de shuttle ratelen. Bij het lopen zal in het begin de pin dieper inzakken, u zult daarbij een tikkend geluid waarnemen.

### **In de prothese stappen (bovenbeen) met koord**

Trek de liner aan zoals beschreven bij 'aantrekken liner', bevestig de koordverbinding aan de liner. Stap vervolgens in de dijbeenkoker en zorg dat het koord niet dubbel kan gaan zitten tussen dijbeenkoker en liner. Trek het koord verticaal strak omhoog en

sluit hem achter de clip boven in de dijbeenkoker. Trek het koord nooit van het been af, hierdoor zal de clip inscheuren.

### **Uittrekken prothese (onderbeen)**

Druk op het knopje dat in de kuit zit. Trek nu het been uit de prothese, terwijl u het knopje ingedrukt houdt. Rol hierna de liner van het been af.

### **Uittrekken prothese (bovenbeen)**

Maak het trekkoordje los uit de clip. Dit moet naar links of naar rechts gedaan worden. Houdt het trekkoordje uit de vertanding van de clip en trek het been uit de koker terwijl u het touwtje mee viert. Rol hierna de liner van het been af.

Er is nog een ander systeem waarbij u door het knopje uit te trekken en een slag te draaien de bevestiging ontgrendeld.

### **Wasvoorschrift en onderhoud**

De liner moet na ieder gebruik goed worden gereinigd met water en alkalivrije zeep of een andere huidvriendelijke zeep, bijvoorbeeld groene zeep. Goed afspoelen onder de kraan, watertemperatuur handwarm. U kunt ook speciaal reinigingsmiddel gebruiken. Uw behandelaar kan u hierover informeren. Na het afspoelen goed droogmaken met een handdoek.

Siliconen liners nooit met een oplosmiddel zoals verdunner, aceton, benzine, enz. reinigen!

### **Vervanging bij beschadiging of slijtage**

De zorgverzekeraars hanteren ieder een verschillende norm wanneer het vervanging van uw liner betreft. Daarom zal in de meeste gevallen eerst toestemming worden gevraagd. Een liner is zeer gevoelig voor inscheuren als deze niet volgens de beschreven instructies wordt aan- en uitgedaan. Als dit is gebeurd, kan de zorgverzekeraar de kosten voor vervanging voor uw eigen rekening laten komen.

### **Als de pin niet meer loskomt uit de prothese**

Het kan wel eens voorkomen dat de pin niet uit de prothese kan worden verwijderd. Trek de bovenzijde van de liner dan los van de huid en doe heel voorzichtig water tussen de liner en de huid. Het is nu mogelijk om de prothese met de liner van het been te halen. Neem contact op met OIM Brabant.