

Maatwerk en confectie korsetten



www.oimbrabant.nl

Uitgave november 2008

OIM *Brabant*

Dynamisch in vooruitgang

Orthopedische korsetten zijn er in vele verschillende uitvoeringen en materialen; zowel maatwerk als confectie.

Maatwerk korsetten worden vervaardigd door ons deskundig personeel, confectie korsetten kopen wij in bij diverse fabrikanten voor orthopedische hulpmiddelen. De medewerkers van OIM Brabant kunnen u, op basis van het door uw arts opgestelde voorschrift, adviseren over het voor uw klachten geschikte type korset.

Het doel

Het doel van het dragen van een korset is om uw klachten te verminderen of op te lossen. De belangrijkste functies van een korset zijn:

- 1 het opleggen van bewegingsbeperkingen
- 2 het corrigeren van de rug
- 3 het ondersteunen van de rug
- 4 het vasthouden van warmte

In de meeste gevallen is er sprake van een combinatie van deze functies. Door toepassing van verschillende materialen wordt een zo goed mogelijk korset verkregen, dat in staat is om uw klachten te verminderen of zelfs op te lossen.

Korset en kleding

Een korset wordt onder de kleding gedragen, direct op de huid of over een dun katoenen (korset-)hemdje. Het hemdje mag niet ploeien en geen naad hebben om drukplekken op de huid te voorkomen. OIM Brabant heeft deze hemdjes in het assortiment. Een korset met een goede pasvorm is bijna niet zichtbaar onder uw kleding; alleen bij het bukken kan een rand zichtbaar worden, veroorzaakt door het buigen van de rug. Sluitingen en andere harde componenten kunnen versnelde slijtage aan uw kleding veroorzaken. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Materiaal

Op basis van het opgestelde medisch advies, kiezen wij voor een voor uw klacht zo optimaal mogelijk functionerend korset. Bijna alle maatwerk korsetten worden gemaakt van linnen en katoenen stoffen met metalen baleinen op de rug voor extra stevigheid en ondersteuning. Aan de hand van de maten die onze medewerker met een centimeter bij u neemt, wordt uw korset speciaal vervaardigd. Een andere manier van maat nemen is via een gipsafdruk van uw lichaam. Deze meetmethode wordt gebruikt wanneer u een steviger of meer corrigerend kunststof of lederen korset nodig heeft. Van de gipsafdruk wordt een mal gemaakt waaromheen het korset in het leder of kunststof wordt gevormd.

Procedure maatwerk

Bij uw eerste afspraak worden de maten genomen en het concept bepaald. Tijdens het tweede bezoek wordt het korset gepast. Bij de derde afspraak is het korset gereed.

Onderhoud

Alle korsetten moeten regelmatig worden gereinigd.

Een stoffen korset moet u met de hand wassen in een handwarm sopje met een zacht vloeibaar wasmiddel. Goed uitspoelen en indien mogelijk in een handdoek droogrollen of afdeppen. Droogtijd daarna is ongeveer 1 à 2 dagen. Gebruik géén centrifuge of droogtrommel.

Kunststof korsetten kunt u met een zachte borstel in water schoonmaken. Het materiaal neemt geen water op en kan gewoon worden afgedroogd.

Lederen korsetten moet u met een vochtige (niet te natte) doek schoonmaken. Om het leer soepel te houden, kan het korset regelmatig worden ingesmeerd met een ledercrème.

Duurzaamheid

Bij normaal gebruik gaat een korset ongeveer twee jaar mee.

Reparaties

Indien u een korset ter reparatie aanbiedt, moet het schoon zijn, anders kunnen wij de reparatie niet voor u uitvoeren.

Betaling

In de meeste gevallen worden het korset en de reparaties daaraan door uw zorg verzekeraar vergoed. Wij vragen uw verzekeraar altijd toestemming om het product aan u te mogen leveren. Om deze aanvraag bij uw zorgverzekeraar te kunnen doen, hebben wij een medische indicatie (aanvraagformulier) nodig van uw medisch specialist (bij een eerste verstrekking), of van uw huisarts (bij herhalingen). De procedure van aanvraag tot toestemming duurt gemiddeld drie weken.

Aansprakelijkheid

OIM Brabant stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist gebruik en/of aanpassingen aan uw korset door de eigenaar of een niet deskundig persoon. Veranderingen verricht door erkende bevoegde personen zonder toestemming van OIM Brabant kunnen betekenen dat wij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. U loopt het risico dat de garantie op uw product vervalt.

Ook bestaat er geen aansprakelijkheid als redelijkerwijs aangenomen mag worden, dat de problemen door anatomische veranderingen zijn / worden veroorzaakt of gewijzigde diagnosestelling. Aansprakelijkheid door OIM Brabant bestaat wel op constructie- en materiaalfouten en beschadigen welke door toedoen van personeel van OIM Brabant zijn ontstaan.

Klachten- procedure

Wij vinden het prettig om onze kwaliteit te verbeteren. Daarom willen wij u vragen om uw klacht te bespreken met uw behandelaar. U kunt uw knelpunt of klacht kenbaar maken via ons formulier voor bevindingen, suggesties of klachten. Indien we onverhoopt het probleem niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Revalidatiecentrum. U dient uw klacht op schrift te stellen en te sturen aan het Revalidatiecentrum Breda, t.a.v. de klachtencommissie, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda.

Levertijden en garantie

Informatie over de levertijd van uw hulpmiddel en de geldende garantieregelingen zijn na te lezen in de algemene folder van OIM Brabant.

**Bezoek voor meer informatie en andere producten
onze website www.oimbrabant.nl**

OIM Brabant - Breda

Locatie: Revalidatiecentrum Breda
Brabantlaan 1, 4817 JW Breda
Telefoon (076) 533 18 00

OIM Brabant - Bergen op Zoom

Locatie: Lievensberg ziekenhuis
Boerhaaveplein 3, 4624 VT Bergen op Zoom
Telefoon (0164) 211 447

OIM Brabant - Roosendaal

Locatie: Orthopedische schoenmakerij
Jan Vermeerlaan 253a, 4703 KW Roosendaal
Telefoon (0165) 536 242

OIM *Brabant*

Dynamisch in vooruitgang